



SANITÄTSHAUS

Wöllzenmüller

*Nah und für Sie da.*

## Informationsbegleitheft



### Gebrauchsanweisung für Ihren orthopädischen Schuh:

Name: \_\_\_\_\_

Lieferdatum: \_\_\_\_\_

Orthopädischer Maßschuh

Diabetes-Therapieschuh

Sonstiger:



SANITÄTSHAUS

Wöllzenmüller

*Nah und für Sie da.*

Für lange Freude am Gehen!

# Moderne Orthopädie-Schuhtechnik

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit Ihren neuen Maßschuhen haben Sie ein medizinisches Hilfsmittel erhalten, welches sämtlichen Vorschriften des Medizinproduktegesetzes entspricht.

Die Funktion wird durch die Indikation und Diagnose des Arztes definiert. So wurden Ihre Maßschuhe individuell über nur für Sie angefertigte Leisten hergestellt. Die so entstandenen orthopädischen Einbauteile sollen Ihre Fußbeschwerden lindern bzw. kompensieren.

Um für Sie einen erfolgreichen Therapieverlauf, die richtige Funktionalität des Hilfsmittels und somit eine optimale Versorgung zu erzielen, beachten sie bitte unbedingt die nachfolgend beschriebenen Informationen.

Für eine fachgerechte Versorgung,  
Ihr Sanitätshaus Wöllzenmüller

## Anwendung:

- Bei Erstversorgungen, Schuhe stundenweise anziehen, damit sich der Fuß an die Bettungen und die Schuhe gewöhnen kann.
- Vor jedem Gebrauch, Kontrolle des Schuhinnenraumes auf lose Teile (Steinchen etc.)
- Fersen sollen bündig an der Fersenkappe anliegen, dann erst Schuhe verschließen.
- Die Laschen (Zungen) sollen gerade sitzen und vor dem Verschließen hoch gezogen werden.
- Führen Sie anfangs nach jedem Tragen der Schuhe eine Fußinspektion durch.

- Sind Druckstellen, Rötungen, Scheuerstellen, andere Hautveränderungen festzustellen oder treten Schmerzen auf, vereinbaren Sie sofort einen Kontrolltermin beim Orthopädie-Schuhmacher. Bitte Schuhe zum Wechseln mitbringen!
- Diabetiker sollten die Schuhe erst 10 Minuten anziehen, dann Füße auf eventuelle Druckstellen untersuchen!
- Achten Sie auf rechtzeitige Instandsetzung von Sohlen und Absätzen. Abgelaufene Sohlen und Absätze führen zur Fehlbelastung von Bein und Fuß und können den Schuhunterbau beschädigen.
- Halbschuhe bitte immer mit Schuhanzieher anziehen, dies hält die Fersenkappen lange stabil.



## Bitte beachten Sie:

- Bei extremen Schwellungen sollte die Maßnahme/Ver-sorgung erst nach Schwellungsrückgang stattfinden.
- Bei frischen offenen Stellen, erst Wundheilung abwar-ten.
- In seltenen Fällen Verletzungen der Haut durch Materi-almüdigung.
- In seltenen Fällen Druckstellen durch nachhaltige Verän-derung der Füße.

Kontaktieren Sie uns bitte umgehend, sollte einer dieser Punkte zutreffen oder andere Probleme mit Ihren Maß-schuhen auftreten!

„Schildern Sie uns Ihr Anliegen, wir helfen!“

## Allgemeines

---

Die Grundausrüstung mit orth. Maßschuhen ist vom Gesetzgeber festgelegt:

- 1 Paar Straßenschuhe,
- 1 Paar Straßenschuhe zum Wechseln und
- 1 Paar Hausschuhe

Die Mindesttragezeit beträgt in der Regel:

- Straßenschuhe 2 Jahre,
- Wechelpaar Straßenschuhe 2 Jahre,
- Hausschuhe 4 Jahre

Sind die Fußbettungen durch Beanspruchung verbraucht, müssen diese ersetzt werden. Bei begründetem Bedarf fertigen wir auch:

Orth. Arbeitsschuhe, Turnschuhe, Badeschuhe.

Bei Kindern unbedingt auf das Wachstum achten. Zu kleine Maßschuhe können große Schädigungen verursachen.

Das gelieferte Hilfsmittel ist eine Sonderanfertigung im Sinne des Medizinproduktegesetzes und entspricht den Anforderungen Anhang 1 der EG-Richtlinie 93/42/EWG.

## Schuhpflege

---

- Schuhe regelmäßig mit Schuhcreme behandeln, damit das Leder weich und geschmeidig bleibt. Verzichten Sie jedoch auf Fett! Im Gegensatz zu Schuhcreme, die mit Silikonen wirken, zerstört das Fett alle Klebeverbindungen am Schuh. Durch die Benutzung des Fettes auf Dauer wird auch die Oberfläche des Leders beschädigt.
- Schuhe rechtzeitig neu besohlen lassen- bzw. die Schuhe von uns regelmäßig kontrollieren lassen.
- Nubuk-Leder oder Velour-Ledersorten sind mit einem speziellen Velour-Spray zu pflegen.
- Bitte darauf achten, dass die Polster durch Materialermüdung rechtzeitig erneuert werden müssen.

## Hautpflege von Allpresan

Ihre Beine brauchen Pflege, um gesund zu bleiben. Es gibt zahlreiche, wohltuende Pflegeprodukte rund um Fuß und Bein – widmen Sie sich Ihren Beinen und Sie werden Entspannung für Körper und Geist erleben. Wir empfehlen:



### Allpresan® BASISPFLEGE

Schaum-Cremes für beanspruchte und empfindliche Haut – für Hände, Körper und Füße

### Allpresan® DIABETIC

Fuß-Schaum-Cremes speziell für Diabetiker

### Allpresan® FUSS SPEZIAL

Wohlfühl-Pflege für strapazierte Füße

Allpresan-Produkte entwickelt von Dermatologen, Podologen, Diabetologen. Wir beraten Sie gerne!

## Leistungen unserer Schuhtechnik:

- Therapeutische Heil- und Hilfsmittel
- Postoperative Therapieschuhe
- Moderne Abformtechniken (Einlagen)
- Druckverteilungsanalysen
- Orthopädische Schuhzurichtung
- Individuell angefertigte orthopädische Schuhversorgungen
- Spezielle Versorgungen („Diabetischer Fuß“, Sportschuhe, ...)
- Kompressionsversorgung (Venenleiden)

## Nachsorgetermine:

---

- 1. Kontroll-/Nachsorgetermin nach ca. 4 Wochen, dann 1/2-jährliche Wartungsintervalle.

| Datum | Maßnahme | Mitarbeiter |
|-------|----------|-------------|
|       |          |             |
|       |          |             |
|       |          |             |
|       |          |             |
|       |          |             |

## Notizen:

---

## Wir freuen uns auf Sie:

---

Sanitätshaus Wöllzenmüller

Oderstraße 9 · 84453 Mühldorf a. Inn

Telefon 08631/5836 u. 7478

Telefax 08631/4134 u. 2056

info@woellzenmueller.de · www.woellzenmueller.de